

Οδηγίες εφαρμογής χειρουργικής μάσκας



Η απλή χειρουργική μάσκα αποτελεί ένα φυσικό φραγμό σε υγρά και μεγάλα σταγονίδια του αναπνευστικού. Εφόσον χρησιμοποιείται σωστά προστατεύει από τη μετάδοση αναπνευστικών νοσημάτων που μεταδίδονται με σταγονίδια



1 επιλογή του σωστού μεγέθους.

2 εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν την τοποθέτηση της μάσκας.

3 εφαρμογή της μάσκας στο πρόσωπο έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι (χωρίς κενά).

4 πίεση του μεταλλικού στοιχείου στη ράχη της μύτης.

5 ασφάλιση με τα κορδόνια στη μεσότητα του πίσω μέρους της κεφαλής και του λαιμού. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αυτοί εφαρμόζονται γύρω από τα αυτιά.

6 αποφυγή επαφής της μάσκας μετά την τοποθέτηση, αλλιώς εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν και μετά την επαφή.

7 αφαίρεση της μάσκας πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αφαιρείται πιάνοντας ταυτόχρονα τους βρόγχους, προσοχή!

8 απόρριψη στον ειδικό κάδο για μολυσματικά αντικείμενα.

9 εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.

10 αποφυγή επαναχρησιμοποίησης της μάσκας (είναι μιας χρήσης).

11 αφαίρεση, απόρριψη και αλλαγή στην περίπτωση που είναι ρυπαρή ή κατεστραμμένη.